

Das Mobiltelefon hat keine SIM-Karte !

Bitte keine Änderungen in den Einstellungen vornehmen.



PIN Mobiltelefone XXXX

Anmeldung Clarius

E-Mail-Adresse: xx@xx

Kennwort: xxxx

Anmeldung in der App auf dem Mobiltelefon nur möglich,
wenn Mobiltelefon im WLAN.

Bitte nicht von der App abmelden.

Starten:

App auf dem Mobiltelefon aufrufen.

Einschaltknopf am Scanner drücken (2 kurze Töne ansteigend).

Scanner verbindet sich mit dem Mobiltelefon.

Auswahl der Untersuchungsregion mit entsprechenden Voreinstellungen über das Feld oben Mitte.

Der Scanner ist aktiv, wenn die Freeze-Taste orange hinterlegt ist.

Speichern:

Im Probetrieb ist ein Speichern lediglich auf dem Mobiltelefon möglich. Eine Übertragung in das Einsatzprotokoll ist nicht möglich. Bitte Befunde als Text dokumentieren (analog zum EKG).

Ausschalten:

Der Scanner deaktiviert sich automatisch nach 15 Minuten oder durch längeres Drücken des Einschaltknopfes (2 kurze Töne absteigend)



Laden:

Kontrolllampe blinkt orange bzw. rot
Scanner piept alle paar Sekunden.

Bedienungsanleitung:

<https://support.clarius.com/hc/en-us/articles/6536039627924-HD3-User-Manuals>

Tutorials:

<https://support.clarius.com/hc/en-us/articles/360020334691-Video-Tutorials>



**Desinfektion nur mit speziellem Desinfektionsmittel.
Nicht mit Hautdesinfektionsmittel desinfizieren.**

Bestandteile:

- ☐ Scanner Clarius HD3
- ☐ Mobiltelefon
- ☐ Ladestation mit Ladekabel und Ladegerät